

activ

meineLinse activ Hard Aufbewahrungslösung

meineLinse activ Hard Aufbewahrungslösung ist eine speziell formulierte Lösung zur Pflege formstabiler gasdurchlässiger Kontaktlinsen. Sie enthält ein patentiertes Multi-Polymer-Komfortsystem, das die Linsenoberfläche bindet und auf dieser einen schützenden Film bildet. Sie umhüllt die Kontaktlinse mit einem Pulver, erleichtert so das Aufsetzen und sorgt für eine gleichbleibend hohe Benetzung über den ganzen Tag. Das patentierte Multi-Polymer-System der meineLinse activ Hard Aufbewahrungslösung vermindert Reizungen sowohl auf dem Auge als auch am Augenlid und sorgt für den Abtransport von Fremdkörpern, die Trageprobleme verursachen könnten.

Die Inhaltsstoffe dieser Pflegelösung wurden auf den Stoffwechsel Ihrer Augen abgestimmt. Sie enthält daneben ein optimiertes Konservierungssystem, das Krankheitserreger auf der Oberfläche formstabiler gasdurchlässiger Kontaktlinsen in wirksamer Weise unschädlich macht. meineLinse activ Hard Aufbewahrungslösung ist speziell für den Gebrauch mit Kontaktlinsen aus Fluorsiliconacrylat und Siliconacrylat sowie oberflächenbehandelten formstabilen gasdurchlässigen Kontaktlinsen entwickelt, nachdem diese gereinigt worden sind. Die Lösung eignet sich auch zur Pflege von PMMA-Kontaktlinsen.

INHALTSSTOFFE: meineLinse activ Hard Aufbewahrungslösung ist eine sterile Pflegelösung. Sie enthält die folgenden Inhaltsstoffe: Desinfektionsmittel: Polyaminopropylbiguanid (0,0005 %), Chlorhexidylgluconat (0,003 %), EDTA Dinatriumsalz (0,05 %). Sonstige: Salze und Pufferverbindungen, Polyquaternium 10, Verdickungsmittel auf Cellulosebasis, Polyvinylalkohol, derivatisiertes Polyethylenglycol.

1. Waschen Sie sich stets die Hände, bevor Sie die Kontaktlinsen anfassen.
2. Folgen Sie beim Reinigen der Kontaktlinsen der Anleitung auf Ihrem Kontaktlinseneiniger.
3. Legen Sie die Kontaktlinsen in den Behälter zur Aufbewahrung und bedecken Sie beide Kontaktlinsen mit frischer meineLinse activ Hard Aufbewahrungslösung.
4. Lassen Sie die Lösung für eine wirksame Desinfektion mindestens vier (4) Stunden lang einwirken, ehe Sie sie auf Ihre Augen setzen.
5. Nachdem Sie die Kontaktlinsen dem Behälter entnommen haben, geben Sie vor dem Aufsetzen noch einmal frische Lösung auf die Kontaktlinsen.
6. Den Aufbewahrungsbehälter täglich mit meineLinse activ Hard Aufbewahrungslösung sorgsam ausspülen und anschließend trocknen.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie alle Anweisungen und Anleitungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten zum korrekten Gebrauch Ihrer Kontaktlinsen wie auch zum Gebrauch der diesbezüglichen Pflegeprodukte sorgsam befolgen.

- **Gebrauchte Lösungen niemals wiederverwenden.** Für eine wirksame Desinfektion die Lösung im Aufbewahrungsbehälter täglich vollständig erneuern.
- **Kontaktlinsen niemals in Reinigungslösung aufbewahren.**
- Lösung nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Letzteres gilt auch für noch ungeöffnete Flaschen.
- Angebrochene Flasche nicht länger als neunzig (90) Tage verwenden.
- Stets sorgsam auf Hygiene und korrekte Handhabung achten. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verunreinigung der Kontaktlinsen und der Pflegelösung mit Bakterien.
- Vermeiden Sie es, diese Lösung in Kontakt mit Kleidung oder Handtüchern zu bringen, da sie auf verschiedenen Stoffen Flecken verursachen kann.

WARNHINWEISE:

- Diese Lösung ist nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- VON KINDERN FERNHALTEN
- Bei offensichtlich verletztem oder gar fehlendem Siegel Lösung nicht verwenden.
- Lösung nicht verwenden, wenn Sie gegen irgendeinen Bestandteil des Produkts allergisch sind.

WENN SIE EINE REIZUNG ODER GAR SCHMERZ IM AUGE VERSPÜREN, ÜBERMÄSSIGEN TRÄNENFLUSS, SICHTBEEINTRÄCHTIGUNGEN ODER EINE RÖTUNG DES AUGES FESTSTELLEN, KONTAKTLINSEN SOFORT ENTFERNEN UND UNVERZÜGLICH KONTAKT MIT IHREM AUGENARZT AUFNEHMEN.


Lieferform: meineLinse activ Hard Aufbewahrungslösung wird in sterilen Flaschchen zu 120 ml angeboten. Die Flaschen tragen eine Fertigungsnummer und ein Verfalldatum.

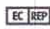
AUSGABEDATUM: 2019-05

 meineLinse

STERILE A

CE 0050

 Bausch & Lomb Incorporated,
1400 N. Goodman St.
Rochester, NY 14609, U.S.A.

 Bausch & Lomb Incorporated,
Cork Road Industrial Estate
Waterford, X91 V383, Ireland
Hergestellt in Italien

Vertrieb durch: Opticland GmbH,
D-90429 Nürnberg

I71085330W-01
P1DE03