

DE
EIGENSCHAFTEN UND HINWEISE
Reinigungslösung zur täglichen Anwendung. Entfernt zuverlässig oberflächliche Ablagerungen wie Lipide und Proteine. Für hohen Tragekomfort und gute Verträglichkeit.

GEBRAUCHSANLEITUNG
Vor jeder Handhabung der Kontaktlinsen gründlich Hände waschen. Linsen absetzen. Einige Tropfen des Reinigers auf jede Seite der Linse geben und diese einige Sekunden lang sanft in der Handfläche oder zwischen den Fingern reiben. Die Kontaktlinsen mit der Kochsalzlösung abspülen und anschließend mit der Desinfektionslösung desinfizieren. Die Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden oder über Nacht in der Desinfektionslösung aufbewahren. Bevor Sie die Kontaktlinsen aufsetzen, nochmals mit Kochsalzlösung abspülen.

VORSICHTSMAßNAHMEN UND HINWEISE
Nach dem Öffnen innerhalb von 90 Tagen verwenden. Zwischen 5°C und 30°C aufbewahren. Nicht verwenden, wenn das Siegel beschädigt ist. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Zum Abspülen der Kontaktlinsen niemals Leitungswasser verwenden. Nicht verwenden bei Überempfindlichkeit oder Allergien gegen einen Inhaltsstoff. Vor Anwendung von Medikamenten, sprechen Sie mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten. Von Kindern fernhalten. **NICHT EINNEHMEN.**

GEGENANZEIGEN
Es existieren keine nachgewiesenen Gegenanzeigen. Wenn Sie Reizungen oder andere unerwünschte Reaktionen feststellen, dann setzen Sie die Linsen ab, stoppen Sie die Anwendung des Produktes und wenden sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

ZUSAMMENSETZUNG
Ethyldiamintetraessigsäure 0.02%, Kaliumsorbitat 0.3 g/100ml, Natriummetabisulfit, Natriumlaurylsulfat, Polysorbitat 20, Polysorbitat 80, Polyvinylpyrrolidon, gereinigtes Wasser.

FR
PROPRIÉTÉS ET INDICATIONS
Solution nettoyante à usage quotidien. Élimine de manière fiable les dépôts tels que les lipides et les protéines de la surface de la lentille. Pour un confort de port élevé et une bonne compatibilité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Avant de toucher vos lentilles de contact, lavez toujours soigneusement les mains. Retirez vos lentilles. Appliquez quelques gouttes de solution de nettoyage sur chaque face de la lentille puis frottez délicatement la lentille en effectuant un mouvement circulaire pour nettoyer sa surface pendant quelques secondes. Rincez soigneusement votre lentille avec une solution saline et désinfecter avec une solution désinfectante. Laissez les lentilles immergées pendant au moins 4 heures ou toute la nuit dans la solution désinfectante. Avant d'appliquer les lentilles dans les yeux, rincer avec une solution saline.

PRÉCAUTIONS
Après ouverture, utiliser dans les 90 jours. Ne pas utiliser la solution si le sceau du flacon a été altéré. Conserver entre 5°C et 30°C. Ne pas utiliser après la date d'expiration. Ne pas utiliser l'eau du robinet pour rincer les lentilles. Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un des composants. Avant de prendre tout médicament, consultez toujours votre opticien applicateur de lentilles de contact ou votre ophtalmologiste. Tenir hors de portée des enfants. **NE PAS AVALER.**

CONTRE-INDICATIONS
Il n'existe aucune contre-indications constatées. Si des intolérances surviennent, telles que des inflammations, des irritations durables ou d'autres problèmes ophtalmiques, retirez les lentilles de contact et n'utilisez plus le produit. Contactez la personne qui adapte vos lentilles de contact ou votre ophtalmologiste.

INGRÉDIENTS
Éthyldiaminetetraacétique 0.02%, Potassium sorbate 0.3 g/100 ml, Métabisulfite de Sodium, Laureth Sulfate de Sodium, Polysorbitate 20, Polysorbitate 80, Polyvinylpyrrolidone, Eau purifiée.



00020676 rev02 2022/10